

DoubleTite

AGNES
MEDICAL

FÜR EINE EFFEKTIVE HAUTVERJÜNGUNG AN HALS, GESICHT, HÄNDEN, DEKOLLETE UND EINE EXZELLENTHE HAUTQUALITÄT.

DoubleTite revolutioniert gerade die Meso-therapie!

Mit dieser neuen Technik ist die Meso-Injektionstherapie und ein gleichzeitiges Radiofrequenz-Microneedling in nur einer Applikation möglich!

Der mechanische Behandlungskopf enthält insgesamt 13 feine Nadeln. Während 8 der 13 feinen Nadeln im Behandlungskopf die kollagenaktivierende Radiofrequenz-Energie in die Haut abgeben, erfolgt über die anderen 5 Nadeln eine Meso-Injektion mit einem auf Ihre Haut abgestimmten Präparat. Zum Einsatz kommen hier z.B. Skinbooster oder leichte Hyaluronsäuren. DoubleTite arbeitet somit gleichzeitig in zwei Schichten der Haut und das in nur einem Behandlungsschritt.

Erstmals wird so die thermische Kollagenstimulation (Typ I und III) und die Wirkungen der Meso-Therapie vereint.

Die Haut wird in der Tiefe versorgt, verjüngt und auch die Hautqualität wird deutlich verbessert. **DoubleTite eignet sich für jedes Alter und jeden Hauttyp zu jeder Jahreszeit** – ob als Anti-Aging Behandlung oder zur generellen Verbesserung der Hautstruktur/Hautqualität.

Optionale Kontaktkühlung


Die Kühltechnologie sorgt für eine angenehme Behandlung.




3D-Nadel
RF+Mesoinjektion

Die Behandlung


Schritt 1

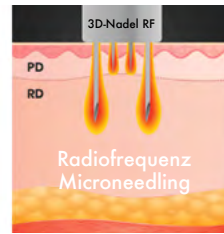

Schritt 2

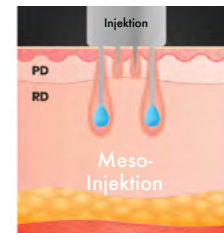

Schritt 3

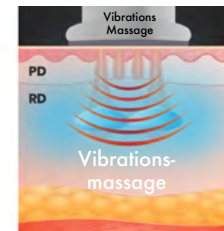


Nach dem RF-Microneedling (Schritt 1) und der gleichzeitigen Meso-Injektionstherapie (Schritt 2) folgt mit **Schritt 3 die Vibrationsmassage**. Das Vibrations-Handstück sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Injektionslösung im Gewebe und ist zudem eine wohltuende Massage.

Behandlungsergebnis am Hals



Vor der Behandlung

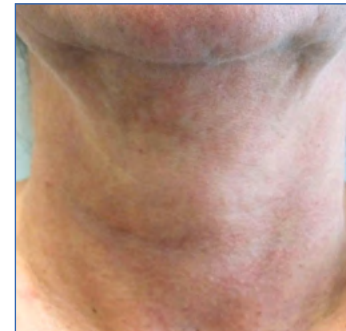

4 Wochen nach einer Behandlung

Weitere Behandlungsergebnisse




Vor der Behandlung




8 Wochen nach zweiter Behandlung




Vor der Behandlung

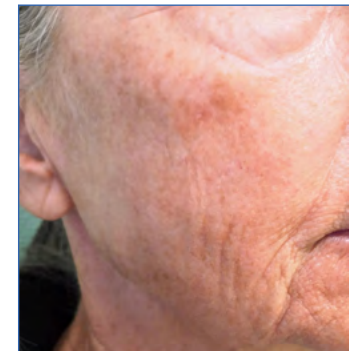

6 Wochen nach einer Behandlung

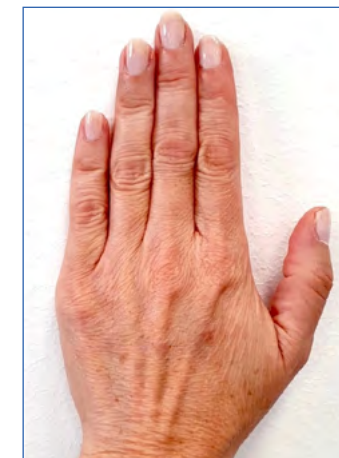

Vor der Behandlung

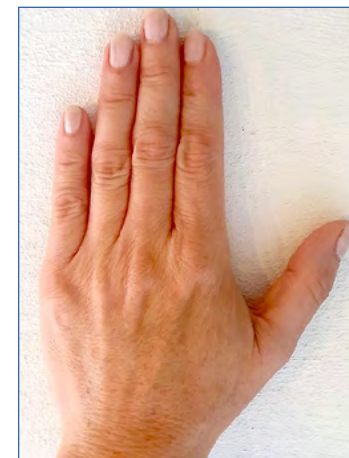

5 Tage nach der ersten Behandlung